



Guía de uso Masculina




1. Lávese las manos.




2. Escoja la posición que le resulte más cómoda para el sondaje. Limpie el glande y el meato con una toallita sin alcohol o jabón neutro sin perfume.



3. Para abrir el envase introduzca los dedos en ambos orificios y tire hacia los extremos hasta que llegue a los topes (notará cierta resistencia) y la vía de drenaje y el fiador queden visibles.

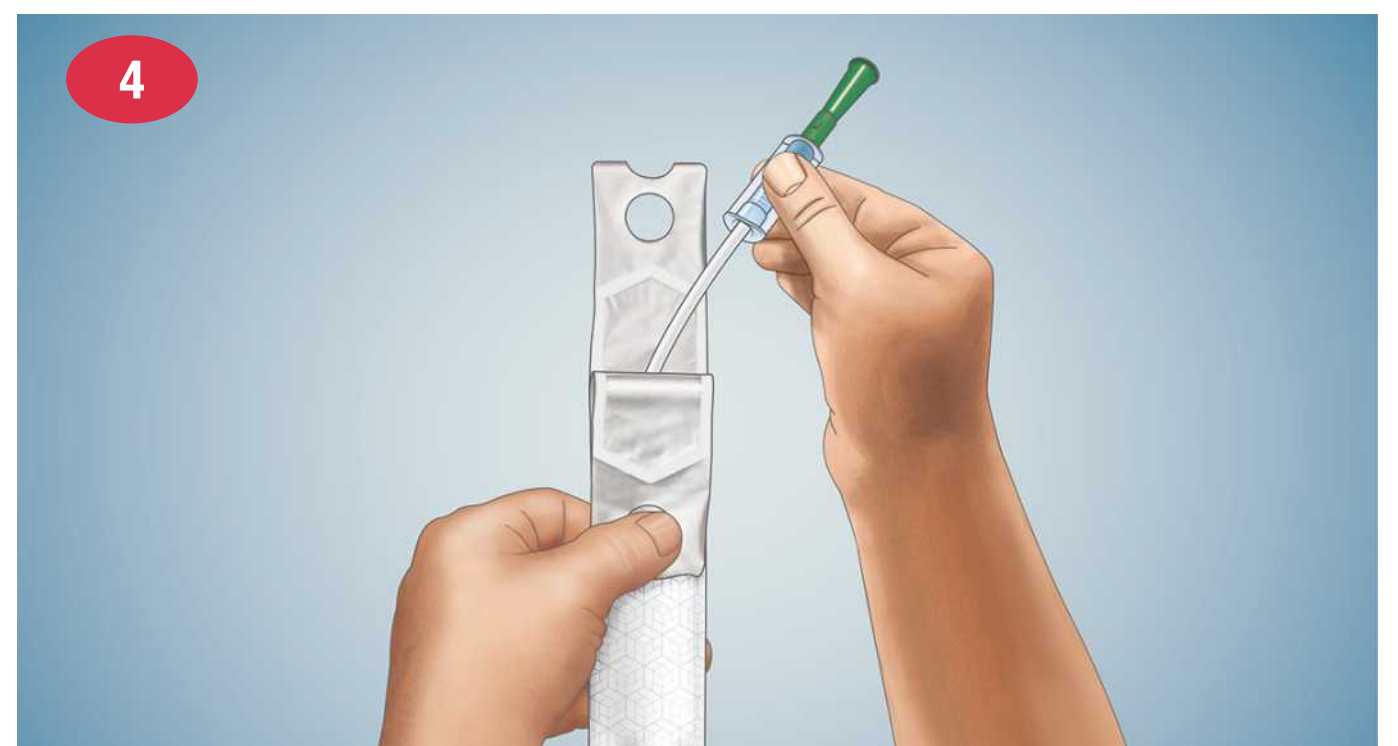

4. Extraiga la sonda sosteniéndola por la vía de drenaje o el fiador. Si lo necesita, puede utilizar la pegatina del envase para fijarlo a una superficie y prepararse para el sondaje.

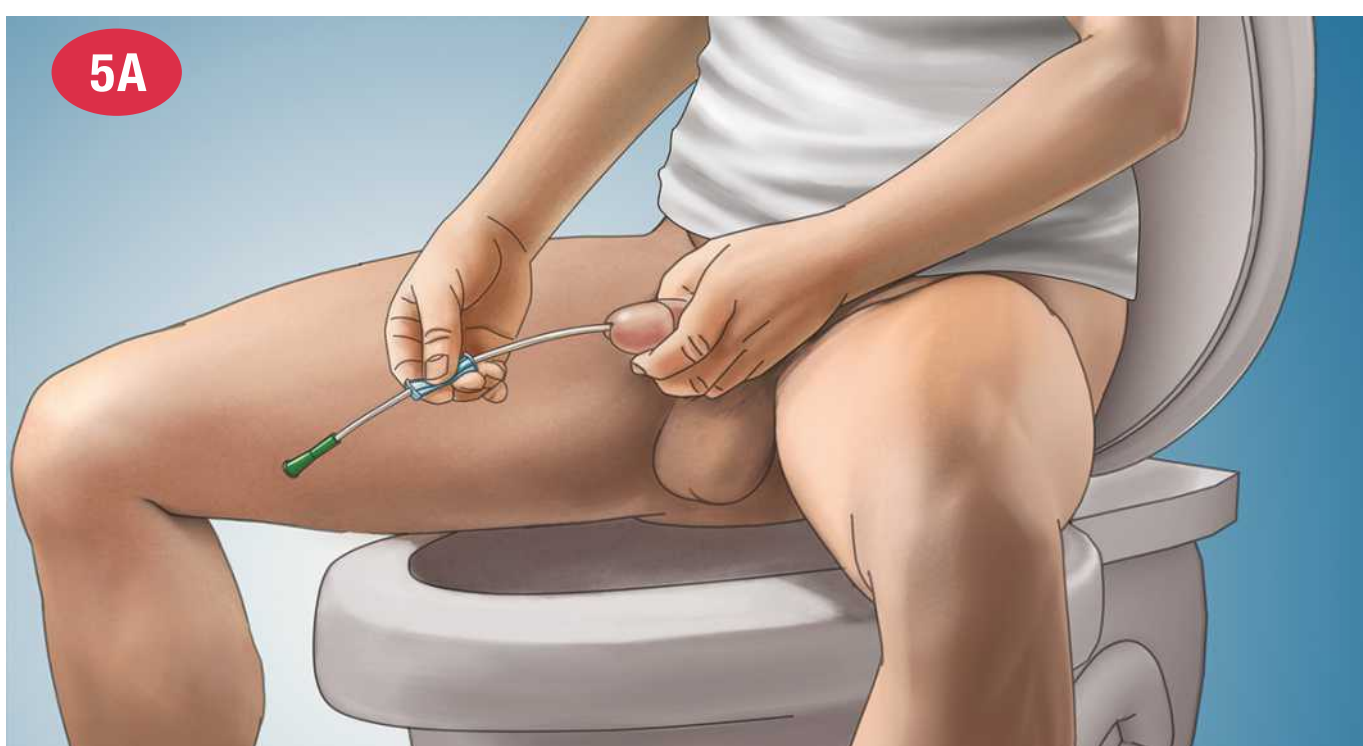

5A. Desacople el fiador ergonómico de la vía de drenaje. Puede sujetar el fiador en cualquier punto de la sonda para un mejor control durante la inserción y de manera que no toque la sonda. Con el pene en posición vertical, sujete y deslice el fiador para introducir la sonda hasta que comience a fluir la orina.



5B. Como forma de sondaje alternativa puede mantener el fiador acoplado a la vía de drenaje. Sostenga el pene en posición vertical con una mano. Con la otra, sostenga el fiador e inserte la sonda en la uretra. Una vez deje de fluir la orina, retire la sonda lentamente y con suavidad para asegurarse de que la vejiga se ha vaciado por completo.



6. Puede desechar la sonda en un contenedor de residuos. No tire la sonda ni el envase al inodoro.



7. Para finalizar lávese de nuevo las manos.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones en Instrucciones. El logo de Hollister es marca registrada de Hollister Incorporated.
© 2023 Hollister Incorporated, ESC077.