




Guía de uso Femenina



1. Lávese las manos.

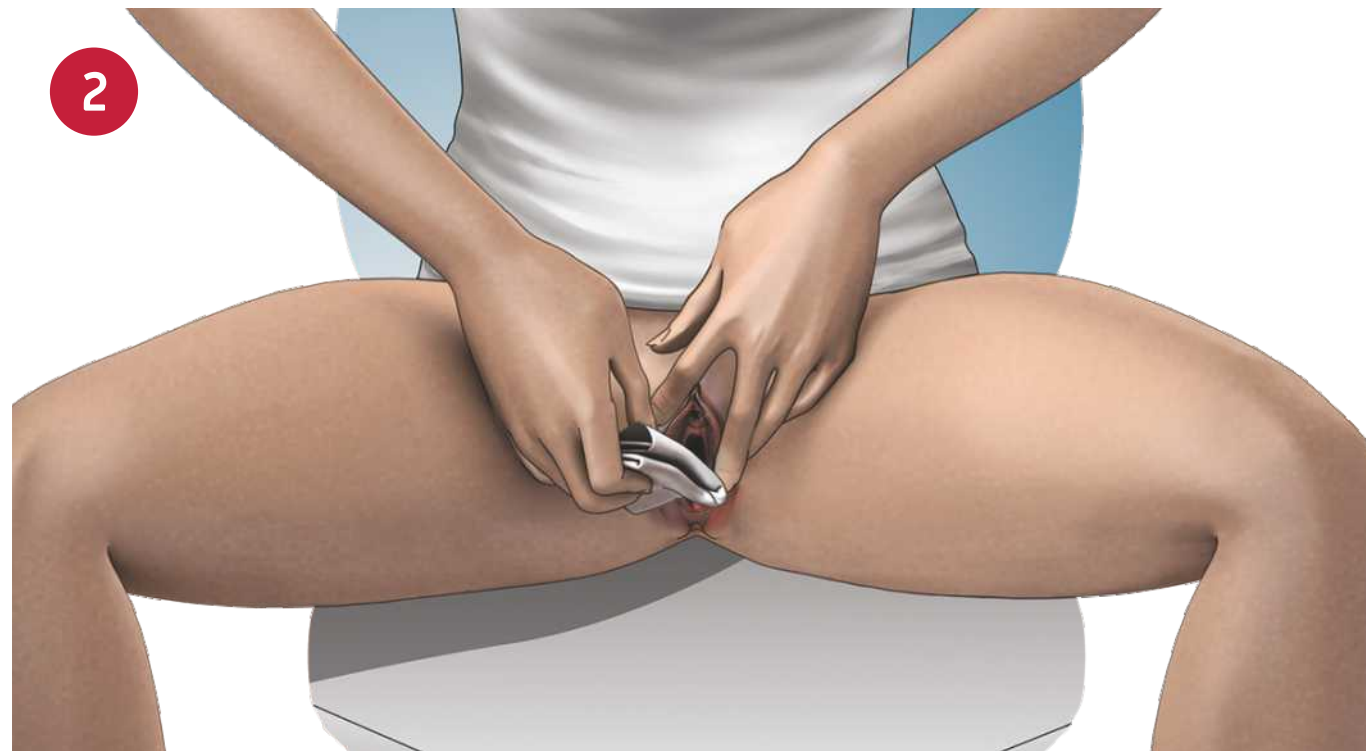


2. Escoja la posición que le resulte más cómoda para el sondaje. Separe los labios y limpie el contorno del meato con una toallita sin alcohol o jabón neutro sin perfume.



3. Para abrir el envase introduzca los dedos en ambos orificios y tire hacia los extremos hasta que llegue a los topes (notará cierta resistencia) y la vía de drenaje quede visible.



4. Extraiga la sonda sosteniéndola por la vía de drenaje. Si lo necesita, puede utilizar la pegatina del envase para fijarlo a una superficie y prepararse para el sondaje.

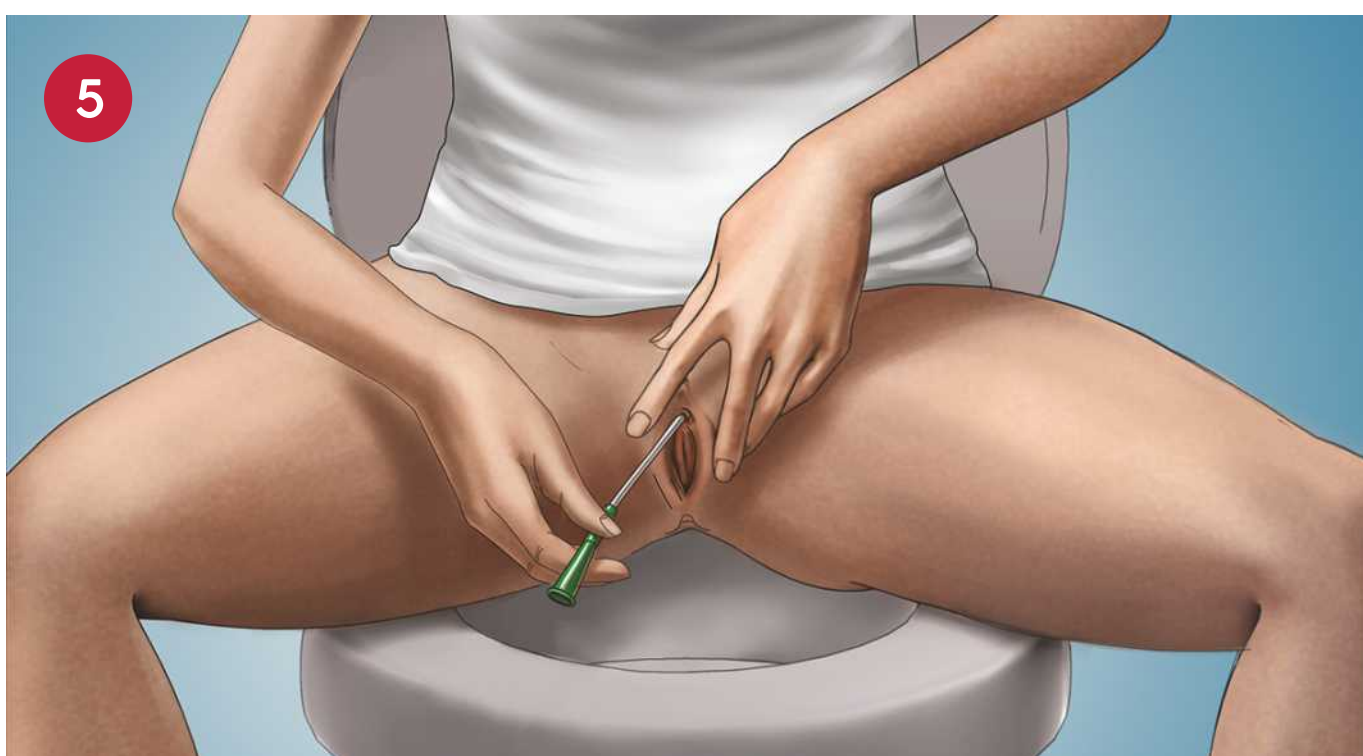

5. Sujete los labios con dos dedos y sepárelos para introducir la sonda en la uretra. Mientras sujeta la vía de drenaje, introduzca la sonda sin tocarla hasta que lo orina comience a fluir. Puede dirigir la vía de drenaje hacia el inodoro o a un contenedor de recogida de orina. Deje que se vacíe la vejiga manteniendo la sonda en su posición. Una vez deje de fluir la orina, retire la sonda lentamente y con suavidad para asegurarse de que la vejiga se ha vaciado por completo.



6. Puede desechar la sonda en un contenedor de residuos. No tire la sonda ni el envase al inodoro.



7. Para finalizar lávese de nuevo las manos.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones en Instrucciones. El logo de Hollister es marca registrada de Hollister Incorporated.
© 2023 Hollister Incorporated. ESC078.